


PENIS PLUS+



BIRKAÇ SANTEMETRE DAHA FAZLAYA KİM HAYIR DER?

übersetzung „gebrauchsanweisung“ in türkisch fehlt

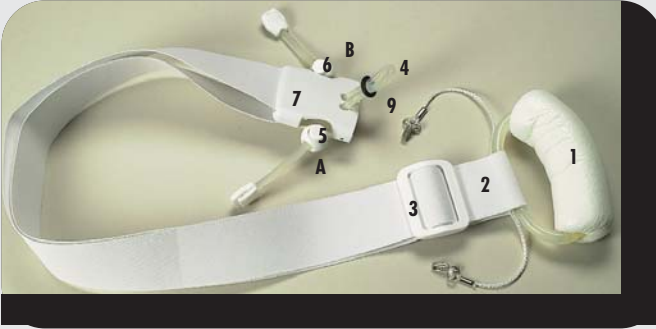

Açıklama:

1. Köpüklü kauçuk ile kaplı silikon çember, penisin üzerinden geçirilir.
2. Bele geçirilen ve yerleştirilen esnek kemer;
3. Kemerin isteğinize göre ayarlayabilmeniz için toka;
4. Tıbbi silikondan yapılmış ve penis ucuna sarılan ilmiç
5. Durdurucuyu açmanıza ya da sabitleştirmenize yarayan basma düğmesi
6. İlmici ayarlamana yarayan durdurucular
7. Yanda delikleri olan naylon tabaka (A+B)
8. Her birinde birer çengel olan sabitleştirici bantlar, bunlar deliklere (A+B) bağlanırlar.
9. Dışarıya kaymayı önlemek için penis ucundaki ince ayara giden ilmiğin dibinde siyah bir silikon

Hazırlık

Penisplus+'u önünüze koyun ve onu kemerin tokasıyla (3) en uzun ölçüye ayarlayınız (önemli!). İlmici de (4) durdurucu ile (5) en büyük konumuna getiriniz. Kemerin belinize sarınız ve onu, kaplamalı silikon çember (1) ve ilmiğin karnınızın önünde gevşek olarak hafif gerilmiş şekilde durmasını sağlayacak şekilde ayarlayınız, sonra da kemeri tekrar çıkarınız.



2. Sabitleştirici bantları (7) şimdi naylon tabakanın yanlarına bağlayınız (6). Pozisyonlar beyaz noktalarla (a+b) işaretlenmiştir. Kemerin her iki son noktaları (1+6) şimdi çengelciklerle (a+b) birbirlerine bağlı durumdadırlar.



1. Köpüklü kauçuk ile kaplı ilmiği (1) penisinizin üzerinden geçirerek etek kıllarına kadar çekiniz ve ilmiği bir elinizle tutunuz. Sonra da diğer elinizle esnek kemeri (2) arkaya doğru belinize dolayarak diğer kalçanın üstünden tekrar penis yönüne getiriniz, şöyle ki ilmiç (4) penis



3. Bazen etek kıllarının başladığı yerden penis ucuna doğru süt sağmaya benzer hareketlerin yapılması, penis ucuna daha fazla kan gelmesine ve silikon ilmiğin (4) daha iyi oturmasına yardım edebilir.



4. Sünnet derisini (sünnetli değilseniz) penis ucunun arkasına kadar çekiniz ve ilmiği (4) penisin başladığı yer ile penis ucunun yuvarlak çıkıntısı arasındaki oyuğa tam olarak yerleştiriniz. ilmik doğru olarak konulduğunda penis ucunun yuvarlaklığının çevresindeki oyuğa yerleşir.



5. Şimdi şeffaf ilmiğin (4) dibine takılı olan küçük siyah halkayı (9), penis ucunun kabarık kısmının arkasından geçen ilmik tam oturana kadar, penis ucunun alt kısmı

yönünde çekiniz. Şimdi ise silikon ilmiğin her iki ucundan da çekerek, silikon ilmiği (4) kısaltınız.



Silikon ilmiğin durmasını sağlayan durdurucunun ucunda bir kapakçık bulunur. Bu düğmeye (5) basarak durdurmaya çözebilirsiniz. Şimdi durdurucuyu tam naylon plakasına kadar itiniz ve durdurma düğmesini bırakınız. Bu sayede durdurucu (6) ile sabitleyiniz.



İlmik artık sabitlenmiş olur. Aynı yöntemi ilmiğin diğer kısmında da uygulayınız.

Ancak penisin ucunun bu arada „boğulmaması“ gerekir! Ancak penis ucunun, penis ucu kabarıklığının arkasından kayıyorsa, germe çok fazla demektir. İnce ayar yapmak için küçük siyah halkayı penis ucunun alt tarafına itiniz. Bu sayede penis ucunun ilmikten kayıp çıkmasını önlemiş olursunuz.



6. Naylon tabaka bu durumda vücuda bitişik durur. Eğer kendiniz aşağıya baktığınızda penisi yandan görüyorsanız penis doğru konumdadır.



7. Daha önce (A) ve (B) çengelleri ile sabitlemiş olduğunuz tutma şeritlerini gevşetiniz. Tutma şeridini, diğer ucun çengeli kemere takılana kadar çekiniz ve diğer ucunu, A veya B naylon plakasına bağlayınız. Bu sayede, penis ucunun ilmikten kayıp çıkması durumunda kemerin arkaya kaymasını önleyen bir güvenlik ipiniz olur.



8. PENİSPLUS+’u taktıktan sonra kayışı (2) kemerin tokasıyla (3) geriliinceye kadar kısaltınız. Ardından da kemeri oturağınızın etrafında, otururken sizi rahatsız etmeyecek şekilde yukarıya doğru çekiniz.



9. En son, kalça bölgenizdeki kemeri yukarıya bel kısmına doğru çekiniz ve otururken sizi rahatsız etmeyecek şekilde ayarlayınız. Bu sayede, oturduğunuz zaman penisin ucu da kayıp çıkmaz.

iki günde bir çekim yönünü değiştirmelisiniz, bunu PENISPLUS+'u bir sağa bir sola koyarak yapabilirsiniz. Böylece penisteki doku aynı ölçüde uzayacaktır.

Kayıp, in giyilmesi rahatlık verici olmalıdır!

Kayıp ilk günlerde yaklaşık sadece 1 saat giyiniz. Güçlü bir germe uygulamayınız; bunu hiçbir şey hissetmediğinizi düşündüğünüzde de germeyiniz. Bu durumda yaklaşık bir saat kadar sonra çok daha fazla ağrı verir. Yaklaşık 1 hafta sonra germeyi yavaş yavaş artırmaz. Yaklaşık 1 saat içinde, penisin kökünde geren, karncalı bir duyu

oluşuyorsa, doğru çekme gücü ayarlanmıştır. Birkaç gün içinde bu karncalanma gider. Yaklaşık 1 saat sonra da penisin ucunun ağrıması gerekir.

İlimik sayesinde bir basınç noktası oluşturduğunuz takdirde, kemerin çekimini azaltınız. Gerekirse biraz gevşetiniz ve bunun için ilmiğin dibindeki halkayı biraz penise doğru yaklaştırınız; bu sayede penisin ucu kayıp çıkmaz. Sizin için en uygun olan gerginliği ayarladıktan sonra, kemerin uzunluk ayarının yanı sıra bir kalemle işaret koymanızı tavsiye ederiz. Bu nedenle kemer artık beyaz renkte üretilmekte ve sizin bu gibi işaretleri koymanızı kolaylaştırmaktadır. (Bu rehberdeki resimlerde halen siyah olarak gösterilmesini anlayışla karşılamanızı temenni ediyoruz.), Bu sayede, germe şiddetini her zaman aynı olarak ayarlayabilir ve daha sonra bu işaretten başlayarak çekimi güçlendirebilir veya azaltabilirsiniz.

Çok gergin olarak ayarlanmış çekim sonucu penisin ucunda bir basınç noktasının oluşması durumunda lütfen germe çekimini azaltınız. En çok basıncın olduğu yerde, ilmiğin bu kısmına yumuşak bir bez veya pamuk da koyabilirsiniz.

Kullanım Süresi

PENISPLUS+ uyum aşamasına göre her gün en azından 5-6 saat giyilmelidir. Lütfen saatte bir yaklaşık 15 dakika ara veriniz. Olası tüm basınç yerleri giderilene kadar penise ve penis ucuna yaklaşık 30 saniye boyunca masaj yapınız. Bu küçük molalar, büyümeyi teşvik eder ve izometrik bir etki oluşturur. Penisin büyümesi yaklaşık 3 haftadan sonra başlayacaktır.

Penisiniz istenen büyüklüğe gelene kadar PENISPLUS+'u takmaya devam ediniz. Ancak sadece düzenli bir kullanım başarı garantisini verir ve kullanıma 2 günden daha fazla bir süre ara verilmemelidir. Kemer sorunsuz bir şekilde ve belli etmeden giysilerinizin altında kullanabilirsiniz ve tualete gittiğinizde de çıkmak zorunda kalmazsınız. İki tutma bandını naylon plakasına takıp silikon ilmiği çözmeniz yeterli. Uygulamaya bir süre için ara vermek istediğinizde de bunu tavsiye ederiz.

Yan Etkiler

PENISPLUS+'un kullanımının tehlikesi kişiye aittir, ancak kullanım talimatına uyulduğunda tamamen sakıncasızdır. Ancak özellikle ilk kullanım haftalarında penise çok fazla bir çekim gücü uygulan-

mamalıdır. Dokunuzun PENISPLUS+'a alışmasını sağlayın ve kemeri başlangıçta az bir çekime ayarlayınız. Yaklaşık 1 saat kadar sonra peniste hoş bir tahrik hissinin duyulması söz konusu olmalıdır. Buna rağmen ağrı duyulursa, durdurucuyu hemen açınız ve penisinizde kan dolaşımının nasıl olduğunu muayene ediniz. Sonra da ilmiği daha gevşek ayarlayınız. Eğer sünet derinizi ilmik altında sıkıştırdıysanız, ilmiği yine çözünüz ve baskının olduğu yerdeki deriye masaj yapınız. İltihaplanmalar veya peniste açık yaralar varsa ya da damar veya doku zayıflığı hallerinde PENISPLUS+'un kullanımından kaçınınız.

Yine as, ağıdaki kos, ullardan birinde PENISPLUS+'u takmamalısınız:

Uyurken, çünkü geceleyin tabii dikilmeler olabilir. Alkol aldıktan sonra veya uyuşturucu madde ve a gri giderici veya teskin edici ilaçların ve uyku haplarının alınmasından sonra, çünkü bu gibi maddeler do gal a gri duyusunu etkileyebilirler.

Penisin ne kadar uzadığını tam olarak nasıl ölçebiliriz?

Lütfen bir mezura kullanınız. Penis uyanmamış haldeyken vücudunuzdan düz bir şekilde dışa doğru çekiniz (90 derece).

Mezurayı yukarıdan bakılacak şekilde penisin yanına koyunuz. Mezurayı düz bir şekilde penisin köküne bastırınız. Bu şekilde penisin uzunluğunu tespit edersiniz. Penisin uyanmış halindeki büyümeyi ölçmek için de aynı yöntemi kullanınız.

Önemli: Uygulamaya başlamadan önce elbisesiz vücut ağırlığınızı tam olarak tespit ediniz. Olası bir kilo almada özellikle etek kıllarının avret bölgesinde, penisin etrafında bir yağ tabakası oluşur. Bu yağ tabakası penisin ucundan penisin dibine kadar olan mesafeyi azaltır ve böylece yanıltıcı sonuç verir (kısaltır). Tıpçılar bu durum için „yağ önlüğü“ tabirini kullanırlar.

Sıkça sorulan sorular:

Penisin ucu bir süre sonra ilmikten kayıp çıkıyor.

Çözüm: Kemer çok gergin ayarlamayınız, kemerin arkadan bele kadar çekilip çekilmediğini kontrol ediniz ve ince ayar için kullanılacak olan ilmikteki siyah halkacığı penis yönünde itiniz.

Penis yaklaşık bir saat sonra ağrıyor.

Çözüm: Kemer özellikle ilk haftalarda çok güçlü olarak ayarlamayınız. Cilt dokusunun germeye ve basınca yavaş yavaş alışması lazım. Büyüme için önemli olan, germenin şiddeti değil, günlük germe süresidir.

Temizlik ve Bakım

PENISPLUS+ 30°C 'de yıkanabilir. Deriyle temas eden parçaların tümü, Öko Tex/100'e, cilde temas eden ürünler test no. 95.0.3793'e, EN 45014'e ve AB Tıp Ürünleri Yasası CE fıkra 9, 1. sınıf Tıp ürününe göre zararlı maddeler açısından incelenmiştir.

Tüm parçaları sonradan ayrı ayrı sipariş edebilirsiniz. HGB AG şirketinin penis uzatmayla ilgili ürünlerini İnternet'te bulabilirsiniz:

<http://www.penisplus.com/>
PENISPLUS+ Hotline

Sorularınız ya da önerileriniz varsa uzmanlarımız her zaman emrinizdedirler.

Telefon Almanya:
Tel.+49 81 77 - 93 16 10
Fax: +49 81 77 - 93 16 20

Malta
Tel: +356 21 47 02 76
Fax: +356 21 47 02 77

E-Mail: info@penisplus.com
phalomed@maltanet.net

